

スマートフォン専用アプリ


# 「ピジョンスイッチ」スタートアップガイド

## スマートフォンアプリ「ピジョンスイッチ」について

「ピジョンスイッチ」は、さく乳器母乳アシストシリーズの電動Pro Personal / Pro Personal+の機能拡張と、さく乳・授乳や育児に関する記録ができる無料のiOS/Android対応アプリです。

「ピジョンスイッチ」に登録し、スマートフォンのBluetooth経由でさく乳器母乳アシストシリーズの電動Pro Personal / Pro Personal+に接続することで、下記の機能を使うことができます。

1. アプリ内からお好みの吸引リズムを選んで、さく乳器電動部のカスタムモードへワンタッチで転送できます。
2. スマートフォンからさく乳器電動部を操作できます。
3. アプリ画面上のタイマー表示で、さく乳時間を確認することができます。
4. さく乳時間や使用したモード、強さを自動でアプリに記録できます。

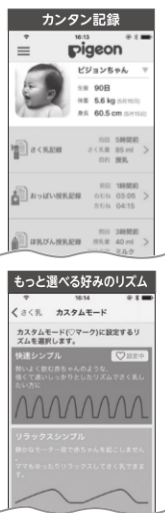

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Pigeon Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

## アプリをはじめて使う (iOS/Android対応)

### STEP 1 アプリをインストールする

スマートフォンに専用アプリ「ピジョンスイッチ」をインストールします。次のA・Bいずれかの方法でインストールしてください。

- A. ウェブサイトにアクセスする。  
<https://pigeon-switch.com/>



- B. 「App Store」または「Google Play」にて **ピジョンスイッチ** と検索する。

※専用アプリは無料です。  
※別途通信料が発生します。

### STEP 2 ユーザー登録をする

「ピジョンスイッチ」を起動し、ユーザー登録を行う。

◆Pigeon.info, Facebook, Twitter, Googleの個人アカウントをお持ちの方  
いずれかのアイコンをタップし本人認証を行ってから、マイプロフィールに必要事項をご入力いただき、最後に「登録」をタップすると登録が完了します。

◆上記の個人アカウントをお持ちでない方

「新規登録」をタップしてユーザーID、パスワードなど必要事項を入力後、「登録」をタップし、Pigeon infoに会員登録します。続けて、マイプロフィールに必要事項を入力し、最後に「登録」をタップすると登録が完了します。



※アプリの仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。そのため、実際のアプリの画面と一部異なる場合があります。

## STEP 3 機器登録をする

1. スマートフォンのBluetooth設定がONになっていることを確認します。
2. アプリ画面の左上のサブメニューから「機器登録」を選択します。
3. アプリ画面に①と表示されたら、自分の近くで別の人が同じく乳器を使用していないことを確認し、「OK」をタップします。
4. アプリ画面に②と表示されたら、さく乳器電動部の電源をONにします。
5. アプリ(スマートフォン)が電動部と自動的に機器登録を開始します。
6. 機器登録がうまくいくと、アプリ画面に「登録が完了しました」と表示されるので「OK」をタップし、機器登録が完了します。



## 注意

- 一度機器登録を行えば、2回目以降の接続時には機器登録する必要はありません。
- 電動部はひとつのユーザーIDのみと機器登録しますが、もし異なるユーザーIDでその電動部と機器登録したい場合、再度アプリの「機器登録」をタップし、上記STEP3同様の手順で機器登録を行ってください。

## ②カスタムモードの吸引リズムを選ぶ

1. Bluetoothが接続されている状態で、「設定する」をタップします。
2. さまざまな吸引リズムの一覧が表示されます。
3. お好みの吸引リズムを選択し、最後に「OK」をタップします。
4. 選択した吸引リズムは電動部のカスタムモードに転送・設定され、自動的にカスタムモードがスタートします。

## 注意

- カスタムモードへの吸引リズムの転送・設定は1種類のみできます。
- カスタムモードに転送・設定した吸引リズムは、電動部の電源をOFFにしても、次回使用時(電源ON時)に設定されています。
- シンプルモード、ナチュラルモードには吸引リズムの転送はできません。



## ③さく乳の記録をする

アプリと電動部をBluetooth接続して、さく乳している状態\*

1. さく乳完了後、さく乳器電動部の電源を長押ししてOFFにする、またはアプリ画面の右下の「記録」のアイコンをタップします。
2. アプリ画面に「記録しますか?」と表示されるので「OK」をタップします。
3. さく乳時間と使用したモード・強さは自動で入力されます。さく乳量を手入力し、最後に登録ボタンをタップすると記録が完了します。

\*アプリと電動部をBluetooth接続していない状態からでも「記録」のアイコンをタップして、さく乳量などを自分で入力し記録することができますが、Bluetooth接続していないため、さく乳時間や使用したモード・強さについては自動で入力されません。



## STEP 4 アプリをさく乳器とつなげて使う

## ①Bluetooth接続する

1. スマートフォンのBluetooth設定がONになっていることを確認します。
2. さく乳器電動部の電源をONにします。
3. アプリのメイン画面の「さく乳」アイコンをタップします。
4. アプリ(スマートフォン)と電動部が自動的にBluetooth接続されます。
5. Bluetoothが接続すると、アプリ画面のBluetoothのアイコンがピンク色に点灯し、「接続済み」と表示されます。



\*アプリの仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。そのため、実際のアプリの画面と一部、異なる場合があります。

