

## USB コネクタ、ケーブル搭載のピジョン製品に関するお知らせ

平素よりピジョン株式会社の製品をお使いいただき、誠にありがとうございます。USB コネクタ及び USB ケーブル搭載の製品を安全にお使いいただくため、以下の事項にご注意ください。誤使用による発熱、発火などの重大事故を防ぐため、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。

1. USB コネクタ及び USB ケーブルのプラグに液体(母乳や水)や異物(ホコリやチリ、金属片等)が付着していないことを確認してからお使いください。

USB コネクタ及びケーブルのプラグに液体、異物が付着すると端子間がショートして発熱、発火の原因となる可能性があります。

2. USB コネクタ及び USB ケーブル搭載の製品をお使いにならないときは乳幼児の手の届かないところで保管をしてください。

乳幼児が誤って部品をなめたり口にくわえたりした場合の唾液等も、USB コネクタ及びケーブルのプラグに付着することで、端子間がショートして発熱、発火の原因となる可能性があります。


3. USB コネクタ搭載の電動部品及び USB ケーブルのプラグに母乳や水、消毒液などがつかないようにご注意ください。

電動部品に搭載された USB コネクタ及び USB ケーブルのプラグに液体が付着することにより、故障・発熱・発火・感電の原因となる可能性があります。もし、電動部品および USB ケーブルが汚れてしまった場合は、乾いた布で拭きとってください。

4. USB ケーブルを差し込む際は、プラグの種類、向きを確認し、USB コネクタに対してまっすぐに奥の方までしっかり差し込んでください。また、プラグが折れ曲がった USB ケーブルは使用しないでください。

奥の方まで差し込まないと接触不良となり、発熱・発火の原因となる可能性があります。

また、一度折れ曲がったプラグを元に戻しても、プラグ内部の変形によって端子間がショートして発熱、発火の原因となる可能性があります。

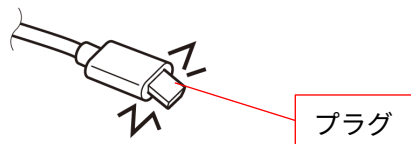

※独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)でも、USB コネクタ、USB ケーブルに関する注意喚起を行っています。(詳細は[こちら](#))

【対象製品】

電動さく乳器、お世話ライトなどに搭載されている USB コネクタ及び USB ケーブル



USB コネクタ



プラグ

ご不明な点につきましては、下記のピジョンお客様相談室までお問い合わせください。

**ピジョンお客様相談室**

TEL **0120-741-887**

受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)

メール：[お問い合わせフォーム](#)

チャット：[チャットサポート](#)

12時～12時45分はお電話での受付を休止しております。

この間は、チャットサポートやメールの利用をご検討くださいますよう、お願い申し上げます。